

# Comfort Focus Bruksanvisning

## Comfort Focus

För ökad koncentration  
och inläring



Svenska



Comfort Audio  
PART OF THE PHONAK FAMILY

## Laddning

Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri tar ca 2 timmar att ladda fullt. När funktionsindikatorn lyser grönt är enheten fulladdad. Ha för vana att förvara produkterna i laddstället.

Stäng av produkterna innan de sätts på laddning, Genom att hålla av/på-knappen intryckt i ca 2 sekunder och titta på displayen ser man att produkterna stängs av. Den röda stapeln fylls upp och texten "Stänga av?" slocknar.

## Information till läraren

### Använda Comfort Focus Microphone

Stå av och på genom att hålla av/på-knappen intryckt i ca 2 sekunder. Du ser på displayen att produkterna startar eller stängs av.

Mikrofonen fästs med sitt clips och används med den medföljande myggmiken alternativt en bommik (tillbehör). Mikrofonerna är näravståndsmikrofoner och fungerar allra bäst inom ett avstånd av ca 30 cm.



### Funktioner Comfort Focus Microphone

Funktionsindikator - *Blinkar grönt var 3:e sek vid normal drift. Blinkar långsamt rött vid svagt batteri.*



## Information till eleven

### Använda Comfort Focus Receiver

Slå av och på genom att hålla av/på-knappen intryckt i ca 2 sekunder. Du ser på displayen att produkterna startar eller stängs av.

Använd Comfort Focus Receiver med de medföljande hörlurarna. Halsbandet (finns i två längder) kan lossas i ena eller andra uttaget om man inte kan trä det över huvudet när de sitter på plats. Se till att halsbandets kontakter sitter i ordentligt (lyssna efter ett klickljud).



Volymen justerar du med volymknapparna.

### Funktioner Comfort Focus Receiver



## Menyn

### Menykontrollen

Det går att göra tre olika val med menykontrollen:  
Bläddra uppåt  
Trycka in/välja  
Bläddra nedåt



## **PIN-kod**

Menykontrollen är låst med en PIN-kod för att undvika felaktiga omställningar i menyn. Pin-koden står på följesedel. För att kunna ändra kanal eller andra inställningar måste PIN-koden först anges.

OBS! För att undvika att PIN-koden gissas förhindras åtkomsten till PIN-inmatningen 5 sek efter uppstart.

## **Att använda flera mottagare**

Vid leverans är mottagare och mikrofon parade och inställda på samma kanal. För att produkterna ska fungera tillsammans måste de vara inställda på samma kanal. Ytterligare mottagare kan läggas till genom att ställa in den på samma kanal som de övriga produkterna.

## **Välja kanal**

1. Välj **Kommunikation** i menyn

2. Välj **kanal**

Kanal 1, 2 och 3 är i de flesta europeiska länder fria kanaler som ej kräver tillstånd. Under "Utökat område" kan fler kanaler väljas, dessa kräver oftast tillstånd, kontrollera med de lokala frekvensmyndigheterna.

## **Batterier**

Batterier av den typ som ingår i Comfort Focus rekommenderas att laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.

## Felsökning

### **Enheterna startar inte**

\* Kontrollera att batterierna är laddade. Tänk på att hålla inne on/off-knappen i 2 sekunder för att starta enheten. Kontrollera att laddaren är ansluten i kontaktuttaget.

### **Dålig taluppfattning**

\* Avståndet mellan mikrofon och talare är för stort. Avståndet bör ej överskrida 30cm.

\* Avståndet mellan mikrofon och mottagare är för stort. Avståndet bör ej överskrida 30m

### **Ljudbortfall och störningar**

\* I vissa miljöer som består av t.ex. betong, järn och plåt kan räckvidden bli kortare.

\* Det kanske även finns störande utrustning i närheten.

### **Inget ljud**

\* Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal.

\* Kontrollera mottagarens inställningar.

## Viktiga säkerhetsföreskrifter -Läs detta innan du använder produkten

- 1) Läs dessa instruktioner.
- 2) Behåll dessa instruktioner.
- 3) Beakta alla varningar.
- 4) Följ alla instruktioner.
- 5) Använd inte produkten nära vatten.
- 6) Rengör endast med torr trasa.
- 7) Använd ej produkten nära varma källor så som element, ugnar eller andra apparater (inkl. förstärkare) som producerar värme.
- 8) Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserande eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad och en tredje jordad spets. Det breda bladet eller spetsen finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för utbyte av den gamla elkontakten. (Gäller endast nätdelar med polariserad kontakt)
- 9) Skydda elsladden från att bli trampad på eller bli ihopklämd, speciellt vid stickproppen, i förvaringsutrymme samt där sladden går in i produkten.
- 10) Använd endast originaltillbehör från Comfort Audio AB.
- 11) Koppla ur kontakten ur vägguttaget vid åska eller när produkten inte används under en längre tid.
- 12) Service får endast utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt service-ställe. Service krävs när produkten har skadats på något sätt, t ex att elkontakten eller elkabeln har gått sönder, vätska har spillts på produkten eller något har ramlat på produkten, om produkten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller om produkten har tappats.
- 13) Börja lyssna på låg volym.
- 14) För hög volym kan allvarligt skada din hörsel.
- 15) Produkten får ej tas isär.

- 16) Om produkten öppnas på grund av skada, ska service utföras hos, av Comfort Audio AB, godkänt serviceställe.
- 17) Använd aldrig sändare eller mottagare inställd på ej tillåten frekvens. Kontrollera med frekvensmyndigheten i det land där utrustningen ska användas.
- 18) Produkten innehåller känslig elektronisk utrustning och måste hanteras varsamt.
- 19) Ladda aldrig produkten i ett instängt oventilerat utrymme så som väskor, fordral eller andra stängda förvaringsutrymmen.
- 20) Endast batteri och laddningsaggregat från Comfort Audio AB får användas.
- 21) Det går ej att byta batteri själv, tag kontakt med inköpsstället.
- 22) **WARNING!** Risk för explosion om batteriet inte är korrekt utbytt.
- 23) Produkten eller batterier får inte utsättas för extrem hetta så som solsken, eld etc.
- 24) Produkterna innehåller radiosändare. Använd inte produkterna på platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, t ex i flygplan.
- 25) Halsbandet får aldrig användas när det finns risk att fastna i något föremål eller någon maskin.
- 26) För att förhindra att batteriet tar skada, låt inte produkten ligga urladdad en längre tid.
- 27) Koppla ifrån laddaren om produkten inte används under en längre period.

Med förbehåll för ändringar



**Tillverkad av:**

**Comfort Audio AB**

Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden  
Tfn +46 35 260 16 00 Fax +46 35 260 16 50  
info.halmstad@phonak.com www.comfortaudio.com

MA0126 1604